


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «Бланідас»
_____ **О.О. Красько**
« 01 » грудня 2025р.



ІНСТРУКЦІЯ
із застосування медичного виробу
Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів
«Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)»



ІНСТРУКЦІЯ

із застосування медичного виробу Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)»

1. ОПИС МЕДИЧНОГО ВИРОБУ.

1.1. Повна назва згідно ТУ У 20.2-36257034-012:2014:

Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)»

1.2. Склад виробу: Серветка виготовлена з нетканного матеріалу, просочена засобом дезінфікуючим «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)», який складається:

діючі речовини: спирт пропіловий - $40,0 \pm 1,5\%$, спирт ізопропіловий - $35,0 \pm 1,5\%$,

допоміжні речовини – алкіл(С12-С16)диметилбензиламонійхлорид, комплекс догляду за шкірою, запашка, дистильована вода до 100%.

1.3. Форма випуску і фізико-хімічні властивості виробу. Виріб Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» може випускатися у вигляді серветок. Серветки з нетканого безворсового матеріалу (спанлейс), мають високу міцність не рвуться, рівномірно просочені дезінфікуючим розчином «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)». При використанні та не залишають розводів та нальоту на поверхнях. Розмір серветок, мм (mm): 150x150, 180x170, 185,6x170. За домовленістю із споживачем може випускатись інших розмірів та пакування.

Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» випускаються у вигляді серветок, просякнута розчином Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express), з характерним запахом спирту, рН складає $5,5 \pm 1,5\%$. Виріб, яким просякнуті серветки, не містить барвників. Комплекс догляду за шкірою захищає руки та шкіру від сухості і подразнень, зберігає еластичність і природний водно-жировий баланс шкіри.

1.4. Специфічні біологічні властивості виробу: спектр антимікробної дії. Засіб дезінфікуючий «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)», яким просочені серветки проявляє специфічну активність та ефективність:

- бактерицидну (ДСТУ EN 1276, ДСТУ EN 13727, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14561) - має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, тощо;

- мікобактерицидну та туберкулоцидну (ДСТУ EN 14348) - Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae;

- фунгіцидну, дріжджоцидну (ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14562) - патогенних грибів Candida albicans, Aspergillus niger, Aspergillus Brasiliensis;

- спороцидну (ДСТУ EN 13704) - Bacillus subtilis (спори);

- віруліцидну (ДСТУ EN 14476) – поліовірус типу 1, вірусів грипу типу А, збудники вірусних гепатитів, ротавірусів, вірусів ЕСНО, тощо.

1.5. Токсичність та безпечність виробу. Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» відповідно до класифікації, наведеної у Наказі МОЗ № 2024 від 03.09.2020 р. за параметрами подразнювальної дії на шкіру відноситься до 4 класу небезпечності, за алергенною дією – до 4 класу небезпечності.

Контроль повітря робочої зони в дезінфікуючому засобі, яким просочуються серветки, здійснюється за вмістом спирту ізопропілового (пропан-2-ол) ГДК – 300 мг/м^3 (п), 3 клас небезпечності; спирт пропіловий (пропан-1-ол) ГДК – 300 мг/м^3 (п), 4 клас небезпечності, згідно з державними медико-санітарними нормативами допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони, які затверджено Наказом МОЗ України від 09.07.2024 р. №1192; ГДК в атмосферному повітрі населених місць: спирт пропіловий – $0,3/0,3 \text{ мг/м}^3$ (максимально разова/середньодобова), спирт ізопропіловий – $0,6/0,6 \text{ мг/м}^3$ (максимально разова/середньодобова).

2. ПРИЗНАЧЕННЯ МЕДИЧОГО ВИРОБУ.

Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» призначені:

- для дезінфекції, очищення виробів медичного призначення, у тому числі некритичних інструментів, інших невеликих за розмірами об'єктів, швидкої дезінфекції поверхонь, медичного обладнання та апаратури, вузлів медичного обладнання та устаткування (у тому числі стоматологічних крісел, кушеток, медичних столиків, кувезів, дитячих ліжок, тощо), а також офтальмологічних, стоматологічних інструментів (у тому числі обертових), протезів, турбін, куточків, виробів з альгінатів та силікону, датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, апаратів ШВЛ, анестезіологічного обладнання, гумових присосок до електрокардіографів та інших апаратів, лабораторного, фізіотерапевтичного, аптечного обладнання, медичних рукавичок, фонендоскопів, посуду, обладнання і поверхні автомобілів санітарного транспорту, тощо.

- для покращення фізіологічного стану ніг методом додаткового очищення та для профілактики грибкових та інших інфекцій в домашніх умовах.

Сфера застосування: заклади охорони здоров'я (хірургічні, терапевтичні, офтальмологічні, отоларингологічні, травматологічні, акушерські, неонатологічні, гінекологічні, дитячі, фізіотерапевтичні, психоневрологічні, патологоанатомічні та інші відділення закладів охорони здоров'я; профільні інститути, стоматологічні клініки, амбулаторії, центри первинної медико-санітарної допомоги, фельдшерсько-акушерські пункти, реабілітаційні центри, медичні центри різного профілю, медико-санітарні частини, інфекційні стаціонари, шкірно-венерологічні, протитуберкульозні, онкологічні диспансери, шпиталі, центри паліативної допомоги, центри з профілактики та боротьби зі СНІДом, центри медико-соціальної реабілітації дітей, судово-медичні експертизи, об'єкти цивільної оборони, міністерства оборони, надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ, інші міністерства, служби, відомства, установи пенітенціарної системи, митниці та прикордонні служби, ветеринарні клініки; операційні; лабораторій (клінічні, біохімічні, вірусологічні, бактеріологічні, серологічні та інші профільні діагностичні лабораторії); станції швидкої медичної допомоги, донорських пунктів та пунктів переливання крові, хоспісів, харчоблоків; автомобілі швидкої та невідкладної медичної допомоги.

3. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» – це готовий до застосування виріб, який використовують одноразово методом протирання.

Серветку дістають з упаковки безпосередньо перед використанням.

Підготовка до застосування: Перед проведенням маніпуляцій, необхідно попередньо вимити руки та очистити серветками «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» в кількості 1-2 шт., протягом 15 сек. Використану серветку утилізувати, а для проведення дезінфекційних маніпуляцій взяти нову серветку з упаковки. Після використання руки не миють, не витирають і не висушують.

Швидка дезінфекція поверхонь ВМП, в тому числі датчиків УЗД та інших некритичних інструментів, рукавичок та інших невеликих за розмірами об'єктів та поверхонь в екстрених (ургентних) ситуаціях проводиться методом протирання об'єктів серветками «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)». Необхідно протирати серветкою, підтримувати поверхню зволоженою протягом 30 секунд. Після завершення часу експозиції змивати виріб не обов'язково.

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ВИРОБОМ

4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання, очей при роботі із виробом. Не потребує засобів захисту шкіри, органів дихання та очей.

4.2. Загальні застережні заходи при роботі із виробом. Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» призначений тільки для зовнішнього застосування та дезінфекційного очищення медичних виробів. Не використовувати для обробки слизових оболонок, не допускати потрапляння виробу в очі. Виріб є пожежонебезпечним, забороняється виконувати роботи із дезінфекції у приміщеннях за наявності джерел відкритого вогню та тепла.

4.3. Методи утилізації. Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» з вичерпаним терміном придатності або некондиційні партії виробу внаслідок порушення умов зберігання, або забруднену упаковку слід утилізувати за допомогою сертифікованого переробника або виконавши попередні необхідні умови перед проведенням утилізації відповідно до вимог Закону України «Про вилучення з обігу, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної небезпечної продукції» та Постановою КМУ від 24.01.2001р. № 50 «Про

затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції». Порожня упаковка, очищений пакувальний матеріал придатний для відновлення первинної форми або для переробки відповідно до вимог законодавства.

Не рекомендується викидати відходи в каналізацію.

5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

5.1. Ознаки гострого отруєння. Не відмічено

5.2. Заходи першої допомоги при гострому (респіраторному) отруєнні виробом. Якщо виникло запаморочення або нудота, вийдіть на свіже повітря і відпочиньте.

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні виробу в очі. Промити очі великою кількістю проточної води. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжити промивання. За необхідності звернутися до лікаря.

5.4. Заходи першої допомоги при попаданні виробу у шлунок. Рекомендується прополоскати ротову порожнину водою і випити води. Не викликати блювоту! У разі необхідності звернутись до лікаря.

6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. Пакування виробу. Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» упаковують у сошетки від 1 до 2 серветок, полімерні банки від 10 до 1000 серветок та у м'які упаковки з клапаном для запобігання випаровування засобу у кількості від 20 до 300 серветок. За домовленістю із замовником кількість серветок в упаковці та форма пакування може бути змінена або доповнена.

6.2. Умови транспортування. Транспортування виробу здійснюють в упаковці виробника усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення відповідної категорії вантажів.

6.3. Термін та умови зберігання. Серветки для дезінфекції та очищення медичних виробів «Бланідас 2000 експрес (Blanidas 2000 express)» зберігають в герметичному пакуванні виробника при температурі від 0 до +40°C у критих неопалювальних складських приміщеннях, захищених від вологи та прямого сонячного світла, осторонь від джерел відкритого вогню і тепла, окремо від легкозаймистих матеріалів і речовин, в недоступних для дітей місцях. Приміщення для зберігання виробу повинні бути забезпечені одним із засобів пожежогасіння. Термін придатності виробу - 3 роки з дати виготовлення. Термін придатності упаковки за умов дотримання правил експлуатації 60 днів з дати відкриття банки/упаковки.

7. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ І АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИРОБУ

Перелік показників, які підлягають визначенню: зовнішній вигляд, колір, запах, рН, кількість дезінфекційного виробу для просочення:

Показники	Вимоги НТД
Зовнішній вигляд, колір	Серветки з нетканого матеріалу безворсового матеріалу
Запах	Характерний специфічний
Показник концентрації водневих іонів, одиниць рН	5,5±1,5
Розмір серветки, мм (mm)	150x150 180x170 185,6x170

7.1. Визначення зовнішнього вигляду, кольору і запаху.

Зовнішній вигляд, колір, запах виробу визначають візуально. Наявність і характер запаху перевіряють органолептично. Запах виробу повинен відповідати заявленому.

7.2. Визначення концентрації водневих іонів (рН).

Метод базується на вимірюванні різниці потенціалів між двома електродами (вимірювальним і порівняльним), занурених в пробу, що досліджується.

Прилади, реактиви:

рН метр, Стакан Н-2-50 ТХС, Посуд мірний лабораторний скляний, Циліндр 1-250

Термометр рідинний і нормативно-технічної документації, з інтервалом вимірюваних температур від 0 до 100°C, з величиною поділки 1°C.

Стандарт-титри для приготування буферних розчинів для рН-метрії , згідно ГОСТ 4919.2

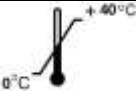
Проведення дослідів:

Рівень рН вимірюють безпосередньо в пробі, що досліджується. рН-метр і електроди готують до роботи у відповідності з інструкцією, що надається до приладу. Налаштування приладу проводять по буферному розчину, значення рН якого лежить в діапазоні вимірювань, що проводяться. Виріб наливають в стакан місткістю 50 см³, кінці електродів занурюють в досліджувану пробу. Електроди не повинні торкатися до стінок і дна стакану. Значення рН знімають по шкалі приладу.

Опрацювання результатів:

За кінцевий результат приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних вимірювань (розходження між ними не повинно перевищувати 0,1 одиниці рН, інтеграл сумарної похибки вимірювання +0,1).

8. СИМВОЛИ, ЗАЗНАЧЕНІ НА МАРКУВАННІ

Символ	Назва	Символ	Назва
	Виробник		Використати до
	Увага, див. супровідні документи		Ознайомитись з інструкцією з використання
	Знак відповідності технічним регламентам з ідентифікаційним номером органу з оцінки відповідності		Температурні обмеження
	Код партії		Обережати від нагрівання
	Зберігати в сухому місці		Утилізувати з побутовими відходами ЗАБОРОНЕНО
	Дата виготовлення		Небезпека для навколишнього середовища
	Вогнебезпечно		Для отримання інструкції із застосування відскануйте qr код



Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, 17, тел.: 0 800 33 15 02 help@blanidas.ua, www.blanidas.ua